

Technický manuál masky

PM2.5 Maska

Manuál k maskám
řady Fashion 2.0



/ Instrukce k produktu

Použití produktu

Tento druh ochranné masky je navržen tak, aby filtroval drobné částice (velikosti menší, nebo rovné 2,5µm) ve znečištěném ovzduší. Mohou efektivně filtrovat smog, špínu, prach, pyl, bakterie a další částice. Pro bezpečí a efektivní použití tohoto produktu si prosím přečtete tento návod a striktně dodržujte instrukce.

Varování! Omezení použití:

- 1. Tento produkt neprodukuje kyslík. NEMŮŽE být proto použit v bezkyslíkovém prostředí.
- 2. Tento produkt nemůže být použit v prostředí zamořeném toxickými plyny.
- 3. Pokud cítíte závratě, nemoc, cítíte se nemocně, nebo cítíte jiné nepohodlí během používání, přestaňte masku ihned používat.
- 4. Pokud je filtr špinavý, nebo cítíte jasné známky toho, že činí překážku v dýchání, filtr vyměňte.


/ Specifikace produktu

Jméno produktu: PM2.5 Style Mask (Masky řady Fashion 2)
Váha produktu: 40g - 90g
Hlavní materiál: Bbavlna, silikon, kůže a další látky, lékařský silikon
Velikosti produktu: Viz. označení velikosti na balení
Úroveň ochrany: GB/T 32610-2016, Třída ochrany B


/ Obsah balení

Maska: 1ks	Výměnný filtr: 2 kusy
Čistící hadřík: 1ks	Přenosný vak: 1 ks
Manuál k použití: 1 ks	

/ Výměna filtru

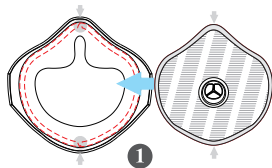

Podle směru bodu vyrovnaní vložte celou kazetu do oblasti silikonového těsnicího kroužku, jak je znázorněno na obrázku.

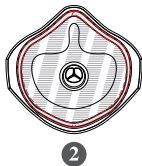


Vložte zarovnávací bod filtrační vložky do drážky těsnicího kroužku a poté okraj drážky těsnicího kroužku postupně.




Ujistěte se, že je filtrační vložka zcela zapuštěna do drážky.

/ Oblékání masky

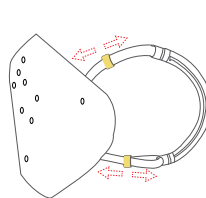

Posouvací spona

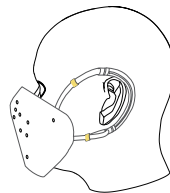

Správně oblečeno

1

Před nasazením upravte popruh tak, aby byl ušní háček ve správné poloze.

2

Nasaďte nosní část masky nahoru, přikryjte bradu a nastavte si ušní háčky.

3

Po výše uvedených krocích se doporučuje provést plynotěsnou zkoušku: Pokud máte ruce nad maskou, pokud při výdechu pocítíte únik vzduchu, je nutné masku znovu upravit podle kroků 1 a 2.

/ Čištění a údržba

Čištění:

- 1) Doporučuje se požádat o profesionální údržbu kožených částí nebo masek s jinými speciálními materiály.
- 2) Pro odolné skvrny použijte měkký kartáč a neutrální čisticí prostředek.
- 3) Hlavní část textilní masky může být použita pro mytí rukou, pokud odejmete kazetu s filtrem před mytím. Doporučuje se masku čistit každý jeden nebo dva dny a pak nechat přirozeně uschnout, aby se udržela čistá.
- 4) Doporučuje se přenosný vak čistit každý jeden, nebo dva dny, aby byl čistý.

Varování!

Kazeta s filtrem je filtrační vrstva masky patřící ke spotřebnímu materiálu. Pokud je filtr znečištěný, zlikvidujte jej jako odpad z domácnosti a poté jej vyměňte za nový.

Skladování

Doporučuje se umístit na suchém a větraném místě se zachováním pokojové teploty a zabránit přímému slunečnímu záření. Po použití, prosím, vložte do přenosné ba zajistit čisté.

/ Vysvětlení identifikačních značek



Teplotní limity



Limity vlhkosti



Sterilizováno Ethylenoxidem

/ Dodatek: Úvod do sterilizace filtru

- 1) O sterilizaci ethylenoxidem

Ethylenoxid se běžně používá pro sterilizaci lékařských nástrojů, účinně ničí širokou škálu bakterií, které mohou způsobit respirační infekce.

- 2) Standard provádění sterilizace

Filtr sterilizovaný ethylenoxidem splňuje požadavky mikrobiálních indikátorů ve standardu GB19083-2020 „Technické požadavky na lékařské ochranné masky“.

/ Zabalený filtr

Filtr je balen v balení sterilizovaném ethylenoxidem, obal bude označen nálepkou chemického indikátoru sterilizace ethylenoxidu. Štítek s červenou značkou je před sterilizací, s modrou po ní.



Před sterilizací

Po sterilizaci

Před sterilizací je filtr tepelně utěsněn a po sterilizaci se pokračuje v konečném balení. Všechny procesy jsou prováděny v čisté lékařské místnosti.



/ Doba působení úložiště filtru

Doba působení úložiště filtru sterilizovaného ethylenoxidem je 3 roky, pokud není obal otevřen.

/ Průvodce rozbalením filtru

Před vybalením se ujistěte, že chemický štítek se sterilizací ethylenoxidu je modrý, což značí, že byl filtr sterilizován a lze jej použít.

Doporučuje se použít nůžky nebo jiné nástroje k oříznutí vaku pod okrajem utěsněné oblasti, aby nedošlo k náhodnému oříznutí filtru.

